



People.Health.Care.

Lomatuell® Pro Gelbildendes Kontaktnetz

Ihr Sicherheitsnetz für die Wundheilung.



Lomatuell® Pro

reduziert das Verklebungsrisiko der Wundauflage mit der Wunde

Produkteigenschaften

Ihr Nutzen



Patientenkomfort

- reduziert das Verklebungsrisiko der Wundauflage mit der Wunde

- hoher Tragekomfort
- schmerzärmer und atraumatischer Verbandwechsel



Einfache Anwendung

- beidseitig verwendbares Material
- flexibel und anschmiegsam
- zuschneidbar

- einfaches Anlegen und Entfernen
- die Lösung für oberflächliche Wunden in jeder Exsudationsphase
- kein täglicher Verbandwechsel erforderlich*



Unterstützt die Wundheilung

- Hydrokolloidpartikel gelieren in Kontakt mit Wundexsudat
- Gittertüll mit offener Netzstruktur
- guter Kontakt zum Wundgrund

- Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden
- lange Verbandwechselintervalle*
- guter Exsudatabfluss in den Sekundärverband

* In Abhängigkeit von der Wundsituation und der Sekundärauflage nach durchschnittlich 2–4 Tagen, spätestens nach 7 Tagen.

Lomatuell® Pro beeindruckt in der Studie:¹

Lomatuell Pro unterstützt die Wundheilung.

61,5%

der Patienten erreichten bis Tag 21 ± 2 ein Abheilen der Wunde.

Lomatuell Pro ist UrgoTül™ hinsichtlich der Schmerzreduktion nicht unterlegen. Bei

97,4 %

der Patienten waren die Schmerzen mit Lomatuell Pro nur minimal. Gemessen beim ersten Verbandwechsel an Tag 3 ± 2 mittels VAS.

Überwiegend

sehr guter

Gesamteindruck der Prüfarzte und Patienten.



Die Einschätzungen hinsichtlich einfacher Anwendung, Anschmiegsamkeit, Verkleben mit der Wunde sowie leichter und schneller Entfernung waren in der Gruppe mit Lomatuell Pro im Vergleich zu der mit UrgoTül™ etwas

besser.

(statistisch signifikant
p < 0,05)

Lomatuell® Pro

Für oberflächliche akute und chronische Wunden.

Für welche Indikationen ist Lomatuell® Pro geeignet?

Exsudationsgrad



Trockene bis stark exsudierende Wunden

Wundtiefe



Oberflächliche Wunden


Wundstadium

- belegte Wunde
- granulierende Wunde
- epithelisierende Wunde

Wundart

Chronische Wunden:

z. B. Ulcus cruris, diabetische Fußulcera und Dekubitus

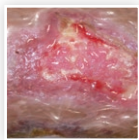

Beinulcera

Akute Wunden:


z. B. Riss-, Schnitt- und Schürfwunden, Verbrennungen zweiten Grades



Schürfwunde

Post-chirurgische Wunden:

z. B. sekundär heilende OP-Wunden, Spalthautentnahmestellen

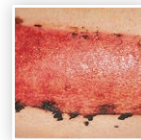

Spalthautentnahme


Einfaches Anlegen und Entfernen.

Schritt 1 Debridement mit Debrisoft Duo



Debrisoft Duo


Schritt 2a Wundversorgung Auswahl der primären Wundauflage Lomatuell Pro

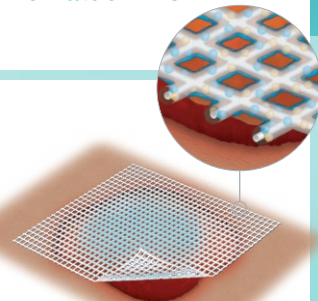

Lomatuell Pro

Reduzierung des Verklebungsrisikos der Wundauflage mit der Wunde und Unterstützung der Wundheilung

Schritt 2b Wundversorgung Auswahl des Sekundärverbandes, z. B. Suprasorb P

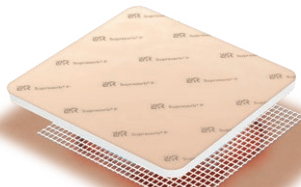

Suprasorb P

weitere Sekundärverbände z. B. Gazin, Vliwasoft, Vliwazell, Vliwasorb, Vliwaktiv, Vliwaktiv Ag, Solvaline N, Suprasorb F Protect, Curafix H

Schritt 3 Kompression Der richtige Druck ist der Schlüssel zum Therapieerfolg



Rosidal

Kompetenz in der Kompressionstherapie

Lomatuell Pro
ist anwendbar in der
Kompressionstherapie



Lomatuell® Pro

Gelbildendes Kontaktnetz



Patientenkomfort



**Einfache
Anwendung**



**Unterstützt
die Wundheilung**



Sie möchten mehr über
Lomatuell Pro erfahren?
Einfach den QR-Code
scannen...



Lomatuell® Pro Gelbildendes Kontaktnetz

Bestellinformationen **Klinikbereich**

Größe (cm)	REF	VE (Stk.)
5 x 5	30 870	10/360
10 x 10	30 871	10/120
10 x 10	30 874	50/450
10 x 20	30 872	10/120
10 x 30	30 873	10/80
10 x 40	220 000	10/120
15 x 20	220 001	5/50
15 x 30	220 002	5/55

Bestellinformationen **Niedergelassener Bereich**

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
5 x 5	33 616	100 050 91	8/288
5 x 5	33 625	110 701 10	120/480
10 x 10	33 617	100 051 16	8/96
10 x 10	33 620	100 051 51	50/450
10 x 10	33 621	107 139 88	120/480
10 x 20	33 618	100 051 22	8/96
10 x 30	33 619	100 051 39	8/64
10 x 40	220 000	162 437 62	10/120
15 x 20	220 001	162 437 79	5/50
15 x 30	220 002	162 437 85	5/55



Tipp: Lomatuell Pro ist auch im Rahmen
der Unterdrucktherapie mit
Suprasorb CNP P3 nutzbar.*



* basierend auf In-vitro-Untersuchungen.

Herausgeber

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Irlicher Straße 55, D-56567 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH, Kirchengasse 17, A-2525 Schönaun an der Triesting

Kontaktadresse

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Westerwaldstraße 4, D-56579 Rengsdorf

Quelle:

1) Malatesta A, Roux F, Trofimenko D, Abel M. Non-inferiority randomised controlled trial of two contact layer dressings for the treatment of acute wounds (SLALOM). J Wound Care. 2025 Jul 2;34(7):496-505.